

Protocol Monstername Salmonella-onderzoek

Instructies voor een zorgvuldige monstername met overschoenen



Bereid u goed voor

1 Was uw handen met water en desinfecterende zeep

Neem monsters

Bemonster alle delen van de stal en gebruik de overschoentjes in een gelijke verdeling. Laat u niet afleiden door ander werk!

2 Vul de aanmeldformulieren in en label de monsterzakken of -potten

Trek alle overschoentjes aan

3 Neem de monsterbenodigdheden mee in een schone emmer

Bevochtig 2 (bij leg-, vleeskuiken- en kalkoenbedrijven) of 5 (bij voorschakels) paar overschoentjes met steriel water

Begin schoon

4 Draag stalspecifieke kleding*

Doe handschoenen aan

Trek plastic overlaarzen aan over uw schoeisel

5 Was opnieuw uw handen met water en desinfecterende zeep

6 Doe zodra u de stal in gaat stalspecifiek schoeisel* aan

Vertrek schoon

7 Doe de overschoentjes in een monsterzak of -pot voordat u de stal verlaat

8 Verwijder het buitenste paar overschoentjes en herhaal stap 11 totdat alle overschoentjes bevuild zijn met mest

9 Bemonster de stal door er doorheen te lopen. Zorg ervoor dat de overschoentjes bevuild zijn met mest

10 **Monsters moeten binnen 24 uur worden verstuurd naar een door de overheid geaccrediteerd lab. Voorkom dat de monsters worden blootgesteld aan direct licht en temperaturen van meer dan 25 graden Celsius.**

Verpak en verzend

11 Controleer de informatie op de formulieren stuur die samen met de monsters naar het lab (niet in de sealbag, de zakjes/potjes kunnen gaan lekken!)

12 Doe de overschoentjes en stalspecifieke kleding uit

Meerdere stallen bemonsteren?

13 Gebruik schone handschoenen en monsternormaal voor elke stal en begin opnieuw bij stap 4: 'Begin schoon'. Was zo mogelijk uw handen opnieuw bij elke stal.

14 Alle stallen bemonsterd? Doe de monsterzakken of -potten in een sealbag en sluit deze goed.

* Stalspecifieke kleding en schoeisel: kleding en schoeisel die specifiek gebruikt worden voor één stal. | Neem monsters altijd zorgvuldig en volgens de vastgestelde frequentie! Gebruik andere kleding en schoeisel als u een andere stal in gaat. | Zie www.avimed.nl voor meer informatie over de frequentie van monstername die voor uw bedrijf geldt.